



En todo el país junto al protesista dental

### **Instructivo Horno de Fotocurado Dentalab:**

Encender el horno con la ficha situada detrás de la máquina.

### **Programación del temporizador:**

- 1) Encender el display delantero con el botón de encendido del lado derecho.
- 2) Mantener presionado durante unos segundos la ficha "Set" del temporizador hasta que comience a titilar el display de color rojo.
- 3) Con las flechas superior e inferior del lado izquierdo de la pantalla puede aumentar o disminuir el tiempo del programa.
- 4) Una vez configurado el tiempo, el display dejará de titilar y comenzará el proceso de fotocurado automáticamente.

### **Instrucciones de uso:**

- 1) Colocar la pieza en el centro de la base rotatoria y cerrar el horno.
- 2) Encender el horno de fotocurado con la tecla que se encuentra en la parte posterior.
- 3) Programar el tiempo deseado en el temporizador.
- 4) Iniciar el proceso de fotocurado. El reloj comenzará a descontar.
- 5) Una vez finalizado el proceso, puede retirar la pieza y apagar el horno con la tecla de atrás.

### **Contacto:**

Mail: [ventas@dentalab.com.ar](mailto:ventas@dentalab.com.ar)

Teléfono: (011) 4829-2433 / 4822-9304

Whatsapp: +54 11 6871-4595